




PZN - 07198100

Anwendung:

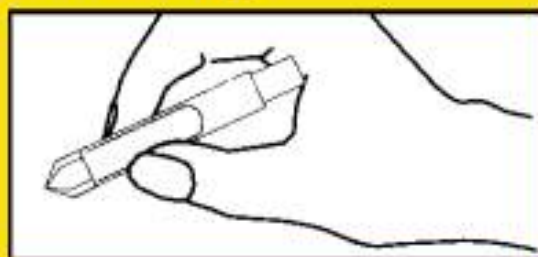

1. Halten Sie die Zeckenzange zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Druckknopf ruht in Ihrem Handballen.




2. Betätigen Sie den Druckknopf der Zeckenzange und die präzisen Greifarme öffnen sich.



3. Setzen Sie die Zeckenzange zwischen Körper und „Kopf“ der Zecke an und lassen Sie nun den Druckknopf los.



4. Drehen Sie nun langsam 2-3 mal. **bislang bewährte Methode**

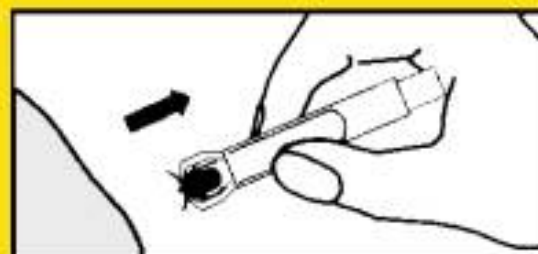


... oder ziehen Sie die Zecke vorsichtig, evtl. leicht rüttelnd, heraus. **neue Methode**



5. Sie haben die Zecke nun völlig unversehrt in den Greifarmen.

Info: Neuere Forschungen zeigen, dass das Herausziehen von Zecken besser ist, als sie herauszudrehen. Diese Spezial-Zeckenzange kann zum Drehen und zum Ziehen eingesetzt werden. Die Greifarme sind extra fein und können sowohl für große, als auch für kleinere Zecken benutzt werden. Zur Entfernung von sehr kleinen Zecken, so genannte Nymphen, benutzen Sie bitte unsere Zeckenpinzette!

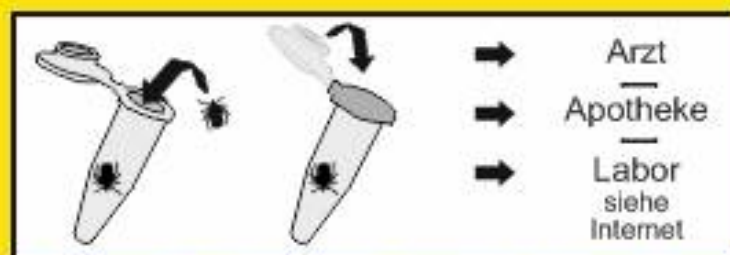

6. Bringen Sie die Zecke im mitgelieferten Behältnis zur Untersuchung* zum Arzt oder Apotheker. Im Internet finden Sie weitere Adressen entsprechender Labore. Andernfalls vernichten Sie die Zecke (z.B. verbrennen). Desinfizieren Sie die Stichstelle. Suchen Sie nach einem Zeckenstich vorsichtshalber einen Arzt auf.

* Die Testkosten sind vom Labor abhängig.

Sicherheitshinweise



Nicht in Kinderhände!



Nicht im Bereich der Augen anwenden!



Bedienungsanweisung lesen!



Entsorgung über den Hausmüll